


【系统说明】



1. 警报静音
2. 报警重置
3. 报警消息列表
4. 波形 (p=压力 v=气流 y=潮气量)
5. 报警信息
6. 开机/关机键
7. 电池 (闪烁=电池在充电
持续亮=充满90%~100%
熄灭=没有连接交流电,
呼吸机关闭和电池工作)
8. 报警
9. 管路接口
10. 压力管接口
11. 调整按钮 (旋转调整 按勾确定)
1. 备用电池
2. 远程报警和护士呼叫接头
3. 以备以后使用 (未开发功能)
4. 电源线固定器
5. 电源线
6. 连接医院信息系统和其他器械,
外加升级软件
7. 冷却扇和过滤膜
8. 高压氧气接头
9. 选件标签

【通气准备】

1. 把呼吸机连接到交流电源和氧气源
2. 安装病人回路

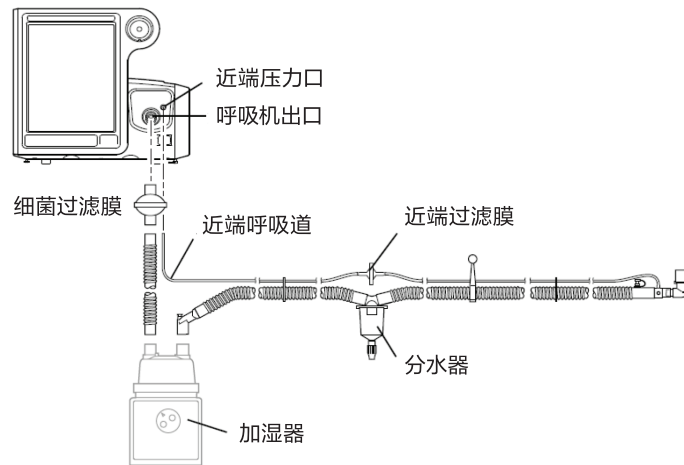

3. 使用开关键打开呼吸机
4. 通过观察电池LED灯检查电池状态
5. 选择面罩/呼气口 (菜单 → 面罩/呼气口窗口)
根据指示运行呼气口检测
6. 执行使用前检测 (见后页) (如果任何一个检测步骤失败,
请停止使用呼吸机并联系飞利浦伟康相关人员)
7. 选择模式, 参数设置, 报警设置

【使用前检测】

执行或观测	确认
1.呼吸机连接到交流电源和氧气源。组装病人呼吸回路	呼吸回路组装正确
2. 打开电源	可以听到备用报警音（高音）和初始报警音（低音）
3. 在 信息 栏中检查面罩和呼气口类型设置	显示正在使用的面罩和呼气口设置类型
4. 选择S/T模式并设置参数如下：频率：4次/分，IPAP：10cmH ₂ O，EPAP：6cmH ₂ O，吸气时间：1秒，压力上升时间：1，Ramp：关闭，O ₂ ：21%。报警设置如下：高频率报警：90次/分，低频率报警：1次/分，高潮气量报警：200毫升，低潮气量报警：关闭，高压报警：50cmH ₂ O，低压报警：关闭，低分钟通气量报警：关闭	测量肺在吸气阶段膨胀并在呼气阶段塌陷。在呼气口有持续气流存在
5. 断开近端压力监测管与呼吸机的连接	呼吸机发出 近端压力监测管连接断开 的报警（声音，可视信息，以及闪烁的报警LED灯），如果连接有远程报警则同时会有远程警报
6. 重新连接近端压力监测管，手动重置报警	近端压力监测管连接断开报警重置
7. 设置O ₂ 为40%。等待氧浓度稳定	氧监测仪读数在35%至45%之间
8. 在呼吸机运行过程中断开交流电源 注意：如果呼吸机有备用电池，则在检测之前电池应有足够电量。在检测之前根据需要进行充电	如果安装有备用电池： • 呼吸机切换至电池供电（屏幕右下角显示电池图标） • 开关按键上方的绿色LED灯保持明亮 • 间断的报警音 • 显示使用电池供电 • 电池LED灯关闭 如果没有安装备用电池： • 发出备用报警音，报警LED灯闪烁至少2分钟
9. 如果安装有备用电池，重新把呼吸机连接到交流电源	• 报警重置 • 呼吸机切换至交流电源供电（屏幕右下角显示图标） • 电池LED灯闪烁说明电池正在充电中
10. 返回医院常用设置	警告：为避免造成病人损伤，在执行完使用前检测后应把报警设置调回医院常规数值



飞利浦伟康学院二维码
欲了解更多产品资讯，
请扫描上方二维码