

# 飞利浦 超声设备 清洁及消毒方案



注意：超声设备进行清洁和消毒前，请仔细阅读该产品《飞利浦用户使用手册》中“清洁和消毒”部分内容，确保安全及可操作性。

## 设备清洁方案

超声设备

1. 超声设备的表面清洁，可以选择**中性肥皂液**。显示器和触摸屏清洁可以选择**显示器专用清洁剂**，但不能包含任何腐蚀性成分，如香精、油类或者醇类。
2. 清洁之前请关机，将电源线从插座上断开，并确保超声机器的制动器锁定。
3. 用**肥皂水沾湿软布**（湿润，不滴水）擦拭超声设备表面或手推车。顽固的污渍，可先用**70%异丙醇溶液**清除后，再用软布擦拭。
4. 设备干燥后，再进行开机操作。

## 设备消毒方案

超声设备

用于产品和检查室的清洁和消毒技术必须符合所有适用的当地法律或法规。

1. 消毒时请**务必佩戴手套和保护眼镜**。
2. 消毒之前，需注意检查消毒剂使用指南中的消毒有效成分、浓度、作用时间及有效期等信息；确保消毒剂兼容且消毒有效。
3. 消毒时请小心不要让消毒液流入或者溅入控制面板缝隙或探头插孔中。
4. 可使用**70%的异丙醇或乙醇酒精消毒剂**擦拭消毒（注意：该消毒剂不能用于探头声透镜部位、探头线缆、主机显示器、触摸屏）。
5. 使用**0.5%过氧化氢或0.6%次氯酸钠**的消毒剂擦拭消毒（适用于探头声透镜和探头线缆）。
6. 经食道探头只能使用**有效成分是2%戊二醛或者0.55%OPA邻苯二甲醛**的消毒液浸泡消毒。

