

DR/胃肠机/ 飞利浦 X光机 清洁及消毒方案



注意：DR/胃肠机/X光机设备进行清洁和消毒前，请仔细阅读该产品《飞利浦用户使用手册》中“清洁和消毒”部分内容，确保安全及可操作性。

设备清洁方案

DR/胃肠机/X光机

- 1. 上釉的部件以及铝制表面**可以用**湿布和柔和去污剂**擦拭，然后再用干的毛织布擦干。切勿使用腐蚀性的清洗剂、溶剂、腐蚀性的去污剂以及腐蚀性的抛光剂。如果您不能确定清洁剂的特性，请勿使用。
- 2. 铬部件**只能用**干的毛织布**擦拭。不要使用磨蚀性的抛光剂。为了保护表面的涂层，请使用非磨蚀性的蜡。
只能用**肥皂和水**清洁塑料表面。如果使用其他去污剂（例如，高浓度酒精），材料会失去光泽并容易开裂。
- 3. 任何标准的玻璃清洁剂**都可用于清洁**触摸屏**（避免使用含有氨的产品）。把玻璃清洁剂喷洒在布或毛巾上，然后擦拭触摸屏（为防止触摸屏故障，请及时除去液滴），灰尘和指印不影响妥善密封的AccuTouch 或 IntelliTouch触摸屏的工作。

设备消毒方案

DR/胃肠机/X光机

用于产品和检查室的清洁和消毒技术必须符合所有适用的当地法律或法规。

- 1. 所用的消毒方法**必须符合关于消毒和爆炸防护的法定规章和指导原则。产品的这些部件，包括附件和连接电缆，都可以使用**适当消毒剂蘸湿的布**擦拭来消毒。
- 2. 切勿使用腐蚀性、溶解性消毒剂或灭菌剂**。如果您不能确定消毒剂或灭菌剂的特性，请勿使用。
- 3. 切勿使用可燃性或是有爆炸风险的消毒喷雾剂**。这些喷雾剂会产生可点燃的蒸汽，导致严重甚至致命的人身伤害。不建议使用喷雾剂对医用产品房间进行消毒，因为这些蒸汽可能会渗入产品，导致电气短路、金属腐蚀或其他损坏。
- 4. 如需使用非可燃性、非爆炸性喷雾剂**，必须先**关闭产品并待其冷却**。这样可以避免对流将喷雾吸入产品。必须用塑料布将产品完全盖住，才能开始喷雾。待所有蒸汽都已散尽，才能揭去塑料布，然后按照以上介绍的方法对产品自身进行消毒或灭菌。如果使用喷雾消毒，产品再次开机之前请确保所有蒸汽都已散尽。

